



Трости опорные серии С, с принадлежностями:

С Standart, С Delta, С Qlever, С Pyramid,
С Touch, С Fold, С Hook, С Comfort, С Soft



Руководство по эксплуатации

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА.....	3
1.1 Назначение.....	3
1.2 Технические характеристики.....	3
1.3 Упаковка.....	3
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	4
2.1 Важные предупреждения.....	4
2.2 Порядок работы.....	4
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	4
4 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.....	5

Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, технических характеристик тростей опорных C Standart, C Delta, C Qlever, C Pyramid, C Touch, C Fold, C Hook, C Comfort, C Soft. Перед использованием, проверьте изделие на наличие повреждений.

1. Описание и работа

1.1 Назначение

Предназначены для облегчения ходьбы, путем уменьшения нагрузки на нижние конечности.

Квадратная опора в моделях C Delta, C Qlever, C Pyramid служит для увеличения устойчивости и используется людьми с нарушенной координацией.

1.2 Технические характеристики

Характеристика	Описание	Артикул
материал	алюминий	все модели
рукоятка	резиновая с обмягчением	C Qlever, C Soft
	пластиковая	C Standart, C Delta, C Pyramid, C Touch, C Fold, C Hook, C Comfort
особенность	квадратная опора	C Qlever, C Pyramid
	основа на 3-х ножках	C Delta
производство	Китай	все модели
гарантия	6 месяцев	все модели

1.3 Упаковка

Комплектация: трость, руководство по эксплуатации

2. Использование по назначению

2.1 Важные предупреждения:

- Протирайте изделие мягким моющим средством и водой, затем высушите.
- Пользователи с ограниченными возможностями или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно не должны использовать данное изделие без сопровождающего лица.
- Максимальная нагрузка на трость C Standart, C Soft, C Hook, C Comfort - 100 кг
- Максимальная нагрузка на трость C Touch, C Fold, - 80 кг
- Максимальная нагрузка на трости C Delta, C Qlever, C Pyramid - 110 кг.

2.2 Порядок работы

1. Трости продаются в собранном виде.
2. При регулировании высоты трости убедитесь, что кнопочный фиксатор полностью выскочил из отверстия.

3. Техническое обслуживание

Перед использованием проверьте, чтобы резиновые насадки не были порваны, изношены или утеряны. Замените насадки в случае необходимости.

4. Условия гарантии

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ проведенных третьими лицами.

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5

Артикул № _____

Дата продажи _____

Подпись продавца _____ место печати,
штампа

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.

(покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя)

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/ 10856 от 13.10.2017



Трости опорные C Standart, C Delta, C Qlever, C Pyramid, C Touch, C Fold, C Hook, C Comfort, C Soft.

Производитель: GUANGDONG DAYANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD, Китай.

Поставщик: ООО «СИМС-2»

125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

Тел./факс : (495) 792-31-90

(800) 200-31-90;

www.sims2.ru

Артикул №	
Дата продажи	

Подпись продавца _____

МП

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

* Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию, гарантийный срок после даты печати руководства по эксплуатации.

Фирма-производитель не несет ответственности за возможные опечатки и ошибки, возникшие при печати.

** Более подробная информация на сайте www.sims2.ru

Для заметок