

Отзыв об использовании аппарата ИВЛ "Ритм 200".

Аппарат искусственной вентиляции легких "Ритм 200" успешно использовался в отделении реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ РКБСМП на протяжении 185 дней (с 25.11.2020 по 31.05.2021 г.).

Отрадно осознавать тот факт, что данная аппаратура экспертного класса и является продуктом отечественного производства.

По результатам успешного использования в период пандемии можно выделить следующее:

- В аппарате успешно реализованы все заявленные режимы вентиляции легких, стандартные (VC, PC, CPAP, PS, Bi PPV) и интеллектуальные (Ad Vent, PCVT, VS).
- Безусловным удобством является встроенная турбина, позволяющая работать без централизованной подачи сжатого воздуха, а в сочетании со встроенным аккумулятором легко применим при транспортировке больных с любым видом нарушения дыхания, как внутри стационара, так и в медицинском транспорте при переводе больного из одного стационара в другой.
- Очень важными опциями являются реализованные в аппарате высокопоточная и неинвазивная вентиляции, особенно востребованы при респираторной поддержке у больных в сознании. Высокопоточная оксигенотерапия позволяет установить поток в широком диапазоне значений.
- Также несомненным плюсом данного аппарата являются, наличие ультразвукового датчика кислорода, не требующего регулярной калибровки и замены.
- Учитывая, что фирма производителя находится на территории РФ, и имеются технические представительства в регионах, сервисное обслуживание не составит проблем.

Вывод: Во время работы аппарат опробованы принудительные и вспомогательные режимы вентиляции. Аппарат соответствует заявленным производителем техническим характеристикам. Аппарат Ритм 200 соответствует основным требованиям к современному аппарату ИВЛ и может составлять достойную конкуренцию, как отечественным, так и зарубежным аналогам. На примере использования аппарата с «ковидными» больными, отмечена его бесперебойная работа!

Зав. ОАиР



/Камарзаев Р.М./